



Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

wie Sie/ihr vielleicht bereits den Medien entnommen haben/habt, beginnt ab morgen die Pflichttestung laut neuester Coronaschutzverordnung des Freistaates Sachsen an weiterführenden Schulen. Ich verweise in diesem Zusammenhang auf unsere Meldung vom 15.03.2021. Die Einwilligungserklärung der Eltern zur Teilnahme am Selbsttest steht dort zum Download bereit.

Alle in der Schule tätigen Erwachsenen müssen zwei Mal pro Woche und alle Schülerinnen und Schüler (SuS) einmal wöchentlich einen Selbsttest durchführen. Sollte dieser dann ein positives Ergebnis zeigen, müssen die betroffenen Personen das Schulhaus wieder verlassen, gegebenenfalls von den Personensorgeberechtigten abgeholt werden.

Die Erziehungsberechtigten können den Test auch von einem Arzt oder eventuell in einer Apotheke durchführen lassen und das bestätigte Testergebnis vorlegen.

Einige Eltern haben bereits nachgefragt, wie dieser Selbsttest abläuft, welche Art Test verwendet wird usw. Diese Fragen möchte ich Ihnen, soweit mir möglich, gern beantworten.

- **Erklärvideo zur Handhabung der Selbsttests durch Schülerinnen und Schüler**

YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=8P-izXYlvBQ>

Alternativer Download: <https://my.hidrive.com/lnk/djruiy66Q>

- Flyer Roche

- Weitere Antworten auf Ihre/eure Fragen finden Sie/ihr auch unter:

<https://www.bildung.sachsen.de/blog/index.php/2021/03/11/faq-tests/>

Laut Coronaschutzverordnung besteht für alle SuS der Sekundarstufe I und II eine Schulbesuchspflicht. SuS, die dieser nicht nachkommen, erhalten Aufgaben über LernSax, sind aber selbst verpflichtet, sich um diese Aufgaben zu kümmern. Es ist nicht von einer Betreuung, wie in Homeschoolingzeiten auszugehen.

Ich hoffe, ich konnte Ihnen bzw. euch die wesentlichsten Fragen zum Thema Selbsttestung beantworten.

Mit freundlichen Grüßen

C. Drehn
(Schulleiterin)





So bereiten Sie das SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Kit von Roche für die Verwendung zur Selbstanwendung vor:



1. Überprüfen der Materialien

Stellen Sie sicher, dass Ihnen folgende Materialien vorliegen:

- 1 **Eine Packung mit 25 SARS-CoV-2 Rapid Antigen Tests und dazugehörigen Verbrauchsmaterialien** (Mat.-Nr. 09 327 592 190)
- 2 **Eine Tüte mit 25 Nasen-Abstrichtupfern (Nasal Swabs), separat verpackt** (Mat.-Nr. 09 421 777 001)
- 3 **Eine Gebrauchsanweisung SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test** (Gebrauchsanweisung für Patienten) (Mat.-Nr. 09 422 919 001).



Bitte überprüfen Sie, ob Ihnen diese Komponenten vorliegen. Falls nicht, kontaktieren Sie bitte Ihre Apotheke/Ihren Lieferanten des SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test.



2. Öffnen der Packung und Entsorgen der aktuell in der Packung beiliegenden Nasen-Rachen-Abstrichtupfer, Gebrauchsanweisung und Kurzanleitung

Öffnen Sie die Packung des SARS-CoV-2 Rapid Antigen Tests und entsorgen Sie die beiliegenden Abstrichtupfer zum Nasen-Rachen-Abstrich*, die Gebrauchsanweisung sowie die Kurzanleitung.



3. Aufnahme Nasen-Abstrichtupfer und Gebrauchsanweisung für Patienten

Legen Sie nun die separat erhaltenen Nasen-Abstrichtupfer (Nasal Swabs) (Mat.-Nr. 09 421 777 001) sowie die separat erhaltene Gebrauchsanweisung (Mat.-Nr. 09 422 919 001) der Test-Packung bei.

Sie können nun mit der Testvorbereitung beginnen.
Bitte lesen Sie hierzu sorgfältig die Gebrauchsanweisung für Patienten durch.

© 2021 Roche Diagnostics.

Roche Diagnostics Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116
68305 Mannheim

www.roche.de/POC-Covid

① 0221

* diese können blau oder weiß/grau verpackt sein

